

Skin scrubber




Art.nr: 100f-335



Fremgangsmåte

1. Sett kontakten til spatelen og armbåndet inn i kontaktene på maskinent.
2. Skru på maskinen og aktiver LCD-skjermen.
3. Trykk på "START/PAUSE"-knappen for å starte Skin Scrubber, fest armbåndet på klientens håndledd. Så snart det er en krets mellom klienten og scrubberen, vil maskinen begynne å fungere. Scrubber-tegnet på skjermen vil kjøre når maskinen fungerer normalt. Så snart det ikke er kontakt mellom scrubberen og klienten, vil maskinen pause, og Scrubber-tegnet på skjermen vil slutte å kjøre. Under arbeid, plasser scrubberen i 45° i forhold til det området som behandles, og gå forsiktig og sakte fremover som vil ha en rensende effekten på huden.
4. Velg ønsket ultralydtype, energinivå og tid. Forskjellige moduser kan velges basert på behovet ditt. Standard: Kontinuerlig bølge, lavest energinivå, 15 minutter.


Under prinsippet om ultralyd og ion-introduksjon, bruker skin scrubber teknikken med ultralyd gjennom vibrasjon for å rense ut hudormer, diagnostisere hudkuler, nekrotisk hud, rester fra kosmetikk, oppsamlet olje osv. fra hudoverflaten for å forbedre blod- og lymfesirkulasjonen i området, styrke cellene og stimulerer til celfornyelseeffekt. Det er tre typer ultralyd under denne funksjonen:

Sinusbølge (), kombinasjonsbølge () eller firkantbølge (), som vil bli tydelig vist på LCD-skjermen. Ion-introduksjon kan forbedre hudens indre miljø og hjelpe til med å fjerne flekker, lysne huden og redusere rynker.

Skin scrubber

Art.nr: 100f-335

Panel

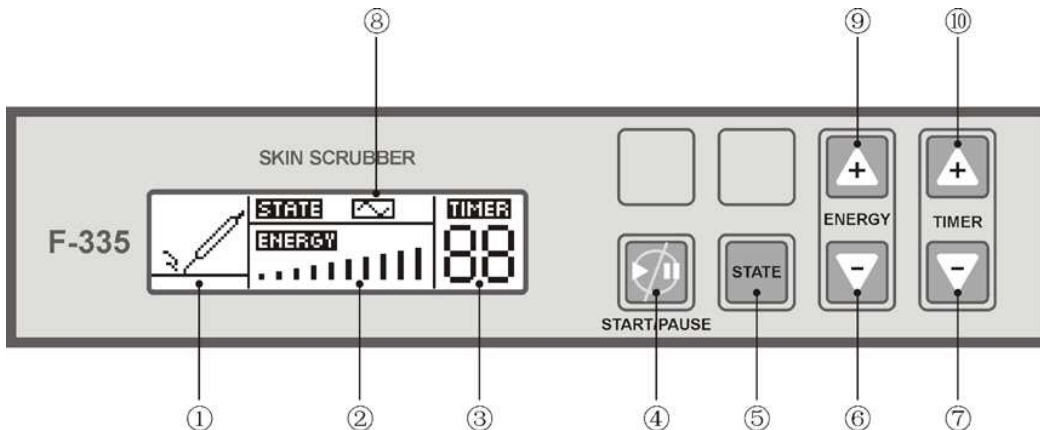

1. Skjerm for Skin Scrubber
2. Skjerm for Energinivå
3. Skjerm for Tid
4. Knapp for "START/PAUSE"
5. Ingen effekt under denne funksjonen
6. "-" for Energi
7. "-" for Tidtaker
8. Skjerm for Ultralydtype
9. "+" for Energi
10. "+" for Tidtaker

MERK

1. Under situasjonen der hovedmaskinen gir lyd hvert 5. sekund, og Skin Scrubber-symbolet på skjermen blinker, betyr det at Skin scrubberen og jordledningen ikke har et kretsløp. Dette skyldes dårlig tilkobling til hovedmaskinen. Sjekk om Skin scrubbere er riktig koblet til, samt armbåndet på håndleddet, og start maskinen på nytt etter at alt er sjekket.
2. Sjekk nøye om det er problemer som dårlig tilkobling, skadet Skin scrubbere eller jordledning, eller ingen utgang fra hovedmaskinen.
3. Under behandlingen bør behandlingsområdet alltid være tilstrekkelig fuktig. For å utføre dyprens fuktes huden med tonic. For innslusning må man ha olje eller gele som er ladet med ioner for å aktivere strømflyten.
4. Sett opp ønsket bølgetype, energi og tid før bruk, unngå væske på hovedmaskinen.

Skin scrubber

Art.nr: 100f-335

Advarsel

- Ikke berør kontaktens inngang/utgang når maskinen er slått på.
- Ikke bruk i direkte i kontakt med øyet.
- Unngå bruk ved;
 1. Hudforbrenninger, skålding, solbrenthet, betennelse eller andre sår.
 2. Hjertesykdom, smittsomme sykdommer, nevrotiske pasienter og personer med metall i kroppen under behandling.
- Holdt huden fuktig under behandling.
- Når du bruker skrubberen, vær oppmerksom på styrken og vinkelen på skrubberen i forhold til huden.
- Under arbeid, vær oppmerksom på forbindelsen mellom tilbehøret og maskinen. Ikke dra overdrevent, for å unngå at tilkoblingsfeil.
- Ikke bruk spatelen hvis spateloverflaten har deformasjoner eller feil, for å unngå skade på huden.

