

Lily

Art.nr: 1002246DFB

Elektrisk behandlingsbenk med 5 motorer, som justerer høyde, tilt, rygg og fotdel. Behandlingsbenken kommer også med egen Reset-knapp.

Benken har en stabil base med et kraftig 3-trinns løftesystem, som gjør benken plassbesparende.

Motorer: 5

Styres: Innebygde knapper

Lengde: 185 cm

Høyde: 58 - 82 cm (+15° tilt)

Bredde: 56 - 80 cm (bredde med armlene)

Maksvekt: 200 kg

Materiale: PU

N.W: 88 kg

G.W: 105 kg


Emballasje: 136×82×70cm

Tillegg:

Håndkontroll


Fotkontroll

Benkepapirholder

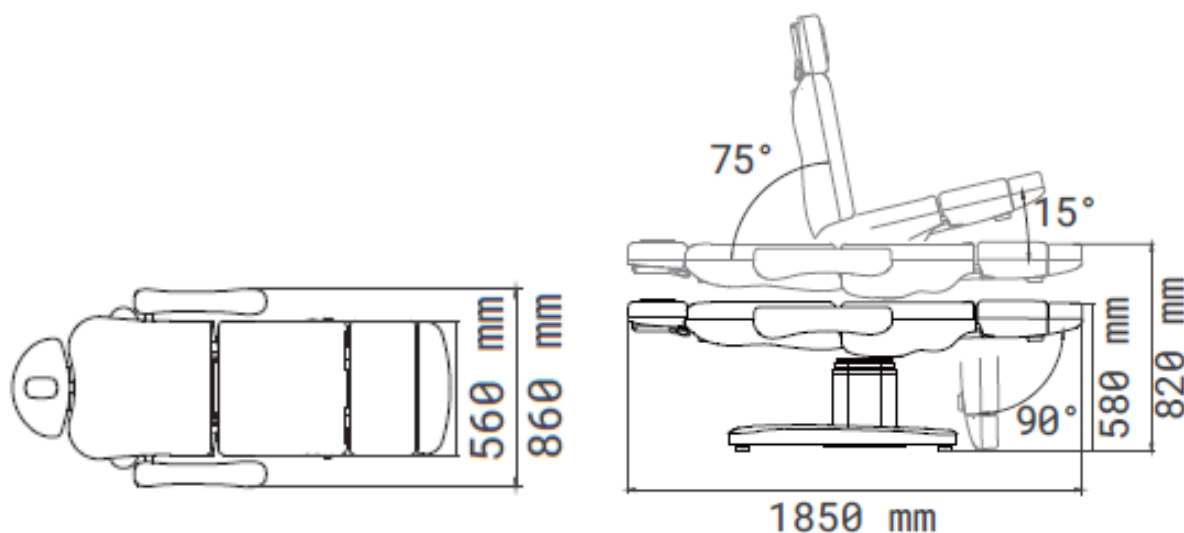


Lily

Art.nr: 1002246DFB

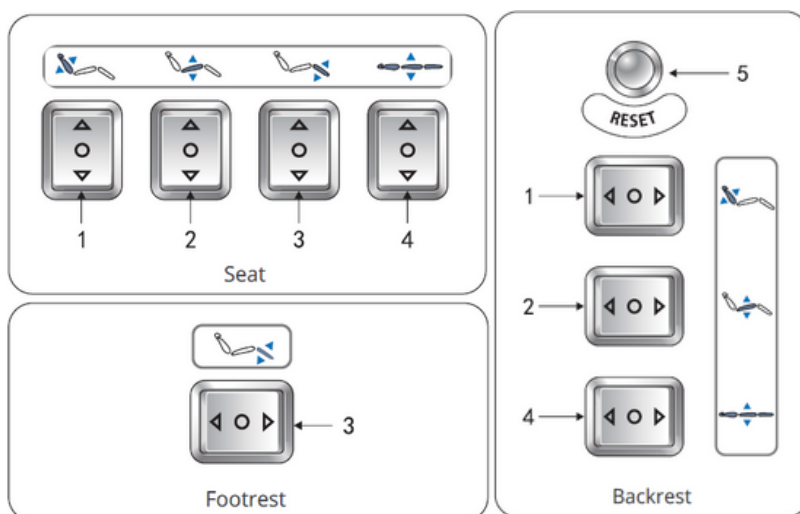

	Beskrivelse	Funksjon
1.	Knapp for ryggstøttejustering	Trykk knappen opp (ned), ryggstøtten beveger seg opp (ned), vinkelen øker (reduseres) med jevn hastighet.
2.	Knapp for Setejustering	Trykk på knappen opp (ned), setet lener seg bakover (beveger seg tilbake til horisontal posisjon).
3.	Knapp for Fotstøttejustering	Trykk på knappen opp (ned), leggstøtten beveger seg oppover (nedover), vinkelen reduseres (øker) med konstant hastighet.
4.	Knapp for Høydekontroll	Trykk på knappen opp (ned), setet beveger seg oppover (nedover), høyden øker (reduseres) med konstant hastighet.
5.	Reset-knapp	Trykk på knappen, ryggstøtten vil automatisk bevege seg opp til maksimum, seteputevinkelen vil automatisk bevege seg til flat posisjon, fotstøtten vil bevege seg ned til minimum, sengens høyde vil automatisk nå laveste posisjon.

Stramming av hodestøtte

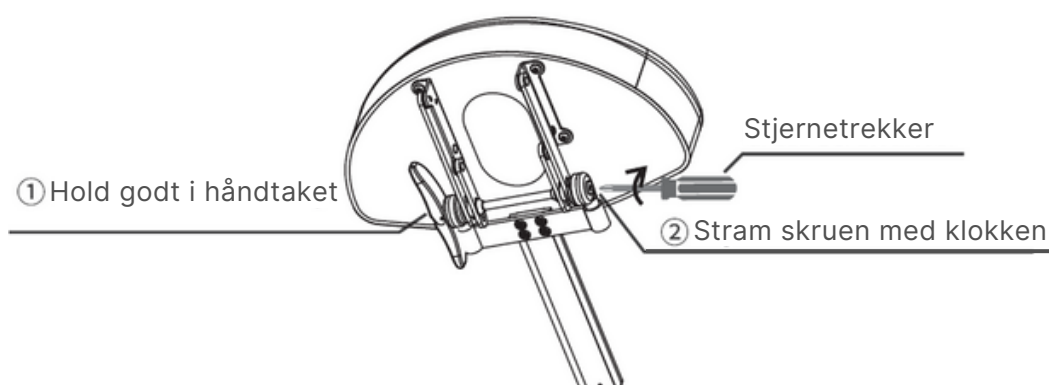


Lily

Art.nr: 1002246DFB


Instruksjoner for å stramme bremsekloss

(Dette er for å stramme bremseklossen der tannhjulet er slitt)

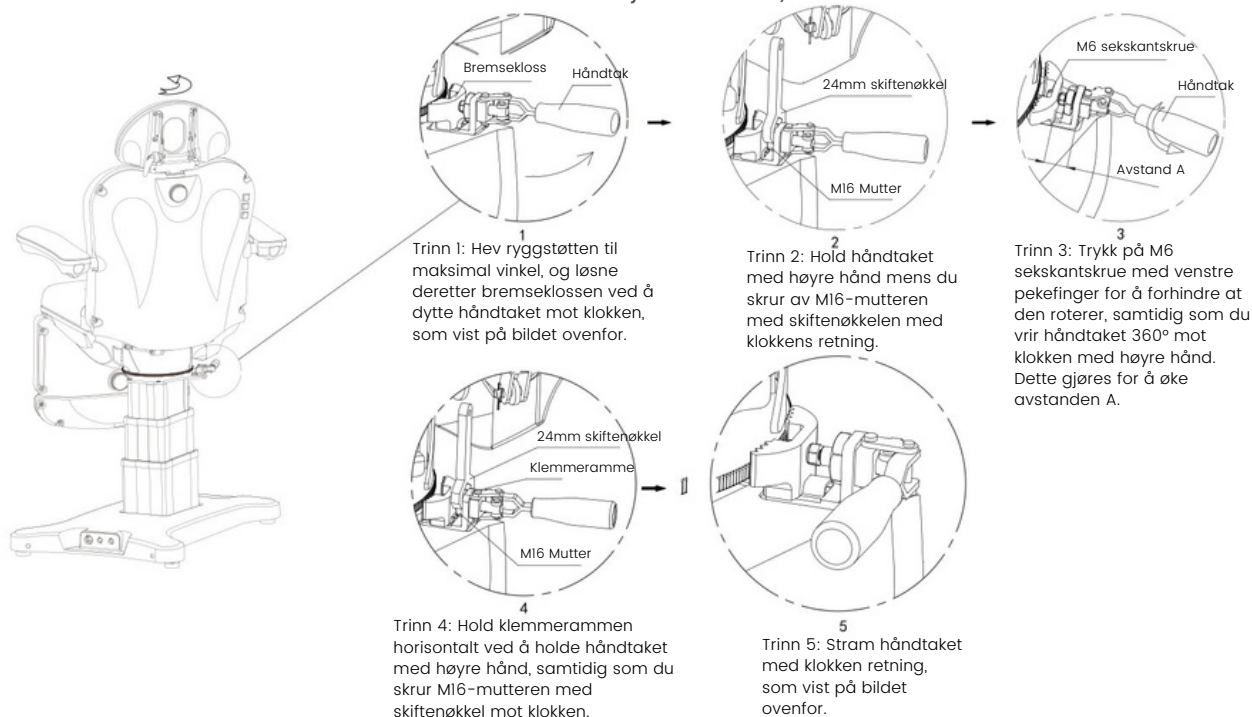

Instruksjoner for å bytte ut bremseklossen

(Dette er for å erstatte bremseklossen hvis tannhjulet på bremsekoen er fullstendig utslitt og den ikke fungerer lenger.)

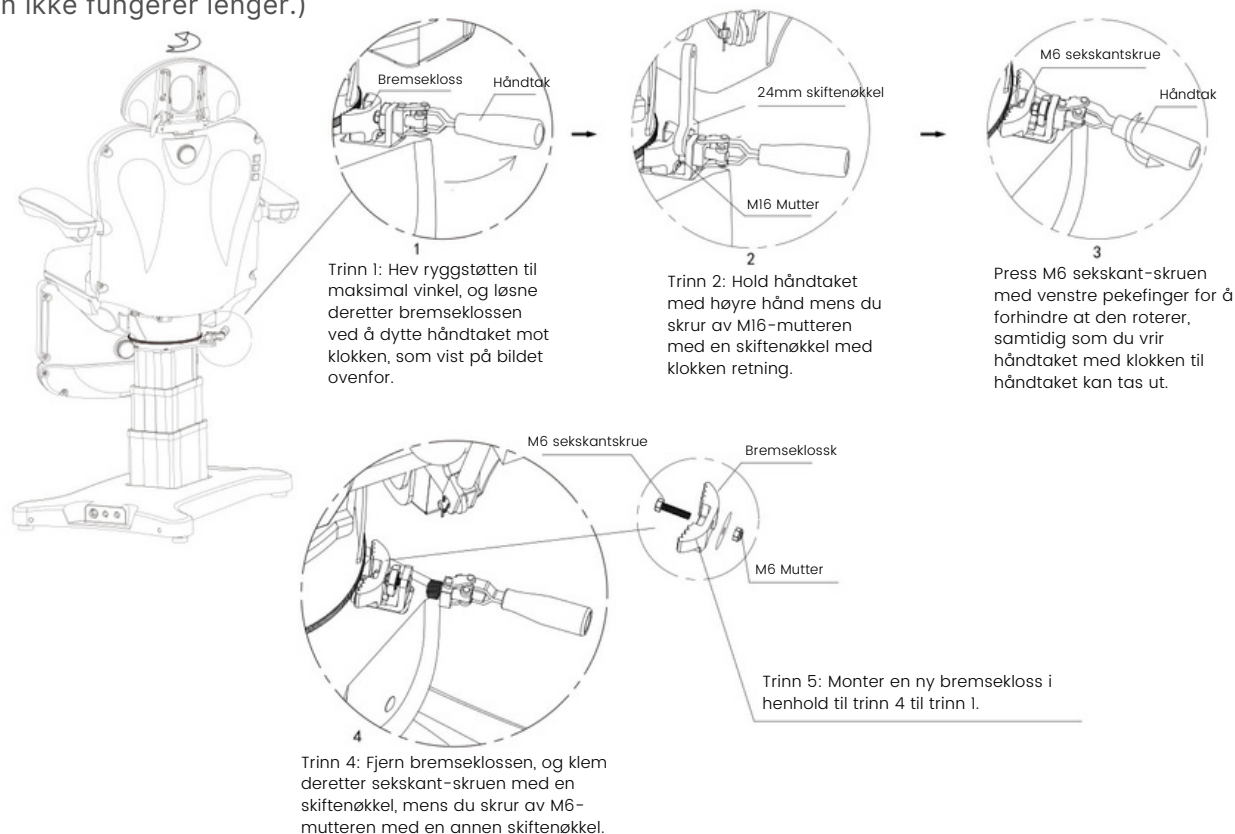


Denne produktgrafikken er kun for visning. For den spesifikke produktstrukturen, vennligst se på det faktiske produktet.

Lily

Art.nr: 1002246DFB

Tekniske parametere

Power	AC 100-120V or AC 220-240V or AC 100-240V,50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C ~ + 40°C
Relativ luftfuktighet	30% ~ 90%
Løftekapasitet	175kg
Pakkestørrelse	136×82×70cm

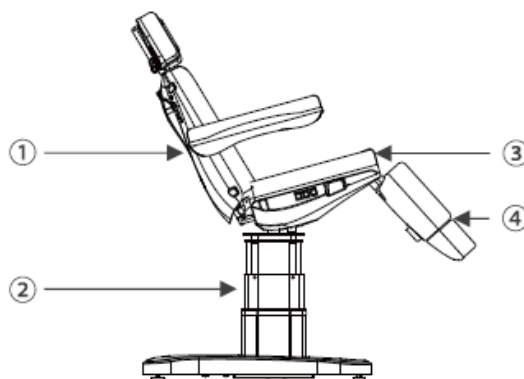

1. vinkeljustering av ryggstøtten
2. hevejustering av hele sengen
3. vinkeljustering av setet
4. vinkeljustering av fotstøtten

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).