

Linnea behandlingsbenk

Art.nr: 1002222BN

Elektrisk behandlingsbenk med fire motorer som styrer benkens høyde, rygg, tilt og fotende. Benken har innebygde knapper i ryggstøtten og i setet, samt reset, lock og memory funksjon.

Motorer: 4

Styres: Innebygde knapper

Lengde: 182 cm

Høyde: 63-85 cm

Bredde: 61 cm (86 cm m/ armlene)

Tilt: 20°

Maksvekt: 200kg

Materiale: PU

Emballasje: 142x68x67cm

N.W: 75kg


G.W: 85kg

Tillegg:

Håndkontroll


Fotkontroll

Benkepapirholder

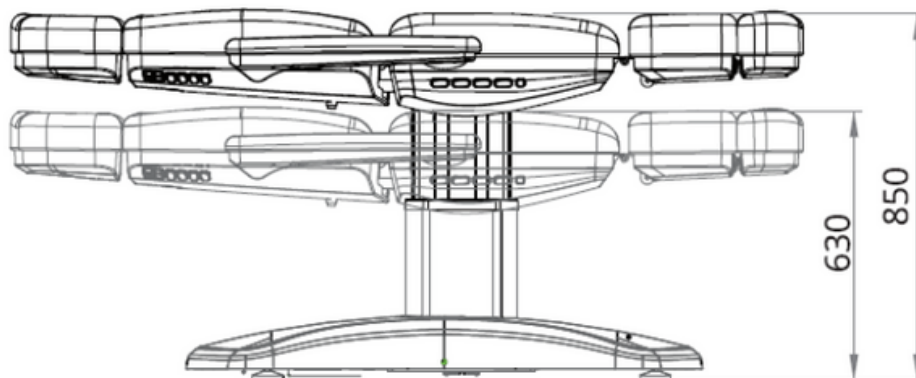

Linnea behandlingsbenk

Art.nr: 1002222BN

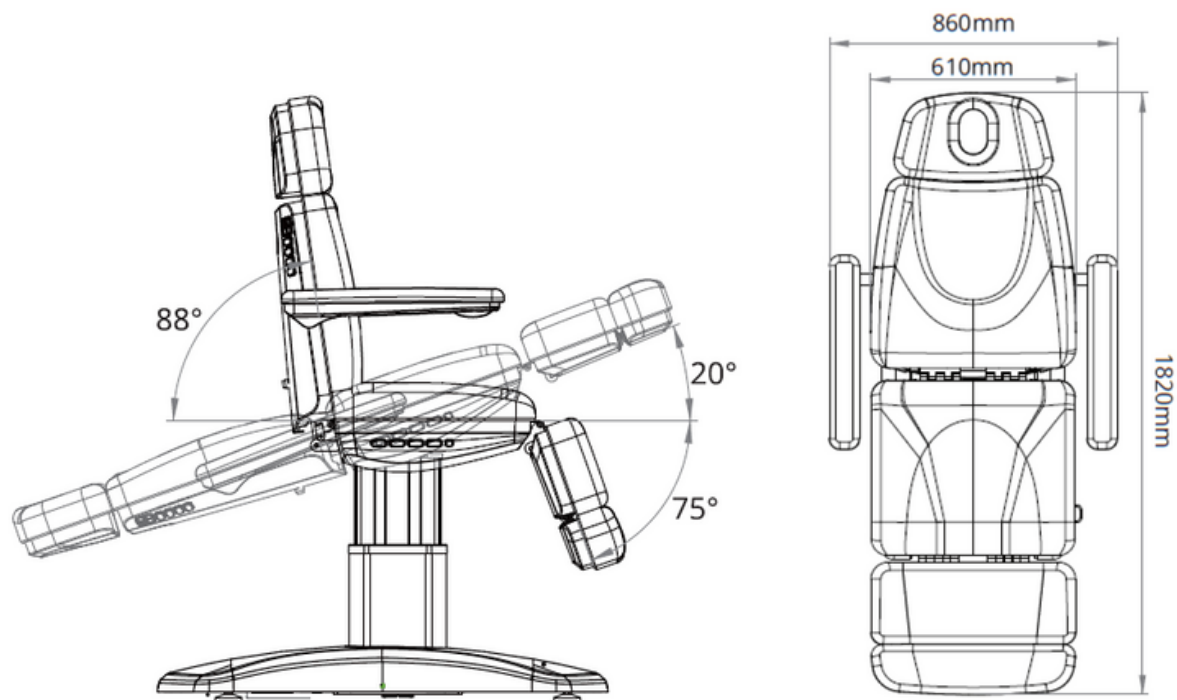

Lysjustering

Lysjusteringen styres av knapper på ryggstøtten og setet.



1. Trykk kort på knappen "☐" for å gå inn i lysjusteringsmodus. Lyset rundt knappene vil blinke raskt.
2. Trykk på knappen "M1" for å endre fargen (totalt 16 moduser)
3. Trykk på knappen "M2" for å endre lysstyrken (totalt 12 trinn)
4. Angi lysfargen og lysstyrken du trenger, og trykk på knappen "☐" igjen for å avslutte lysjusteringsmodusen. Hvis ingen handling utføres innen 10 sekunder, vil lysjusteringsmodusen avsluttes automatisk.



Linnea behandlingsbenk

Art.nr: 1002222BN

Standard konfigurasjon (vippebrytere)

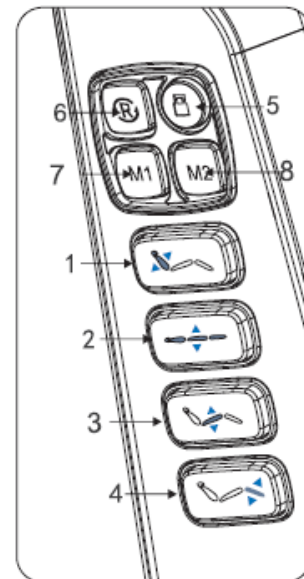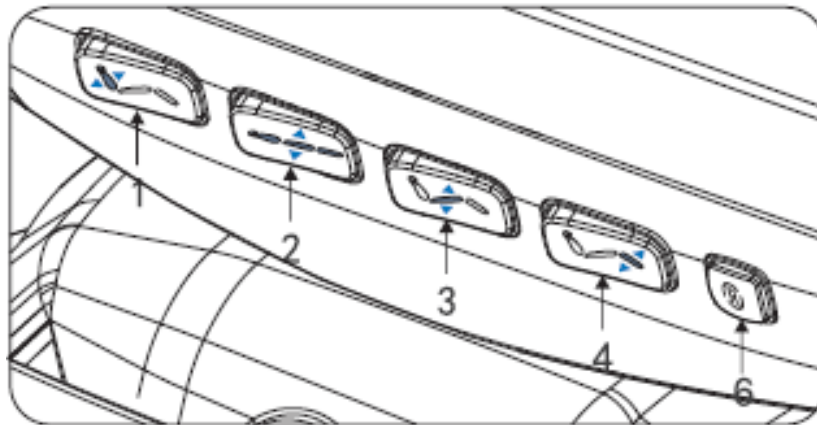


	Beskrivelse	Funksjon
1.	Knapp for justering av ryggstøtte	Trykk knappen opp (ned), ryggstøtten beveger seg opp (ned), vinkelen øker (reduseres) med jevn hastighet.
2.	Knapp for høydekontroll	Trykk på knappen til høyre (venstre), setet beveger seg opp (ned), høyden øker (minker) med jevn hastighet.
3.	Knapp for justering av setet	Trykk på knappen til høyre (venstre), setet lener seg bakover, høyden øker (minker) med jevn hastighet.
4.	Knapp for justering av fotstøtte	Trykk på knappen til høyre (venstre), fotstøtten beveger seg opp (ned), vinkelen minker (øker) med jevn hastighet.
5.	Sikkerhetslås-knapp	Hold nede "safe-lock-knappen" i omtrent tre sekunder, det røde lyset rundt knappen lyser opp, alle knapper kan ikke betjenes, bortsett fra safe-lock-knappen. Hold nede safe-lock-knappen i omtrent tre sekunder igjen, det røde lyset på knappen slukker, alle knapper går tilbake til normal driftsstatus.
6.	Knapp for éknapps nullstilling	Trykk på knappen, ryggstøtten vil automatisk bevege seg opp til maksimum, seteputevinkelen vil automatisk bevege seg til flatt, fotstøtten vil bevege seg ned til minimum, sengens høyde vil automatisk nå innstilt posisjon.
7.	Innstilling av minneposisjon 1	Minne/Programmerbar posisjonsinnstilling: Etter å ha justert stolen til ønsket posisjon, trykk på "M1"-knappen i 2-3 sekunder. Når du hører lyden "beep...beep...beep", betyr det at posisjonen er lagret vellykket.
8.	Innstilling av minneposisjon 2	Minne/Programmerbar posisjonsinnstilling: Etter å ha justert stolen til ønsket posisjon, trykk på "M2"-knappen i 2-3 sekunder. Når du hører lyden "beep...beep...beep", betyr det at posisjonen er lagret vellykket.

Linnea behandlingsbenk

Art.nr: 1002222BN

Tekniske parametere

Støm	AC 100-120v or AC 220-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C-40°C
Relativ luftfuktighet	30%-90%
Løftekapasitet	200kg
Pakkestørrelse	142x68x67cm

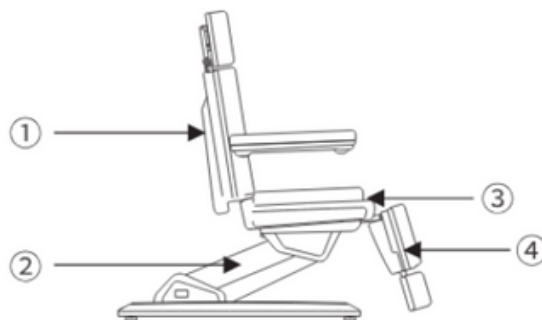

1. vinkeljustering av ryggstøtten
2. hevejustering
3. vinkeljustering av setet
4. vinkeljustering av fotstøtten

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).