

Jonas behandlingsbenk

Art.nr: 1002251a

Elektrisk massasjebenk med 2 motorer som styrer benkens høyde og rygg. Resten av seksjonene styres manuelt eller med hudraulikk. Benken har en stødig base, og er utstyrt med to hjul som gjør benken lett å flytte på. Armlenende kan justeres opp og ned.

Motor: 2

Styres: Håndkontroll

Lengde: 207 cm

Høyde: 60- 92 cm

Bredde: 68 cm

Maksvekt: 175 kg

G.W: 90kg


N.W: 68kg

Tillegg:

Fotkontroll




Standard konfigurasjon (håndkontroll)

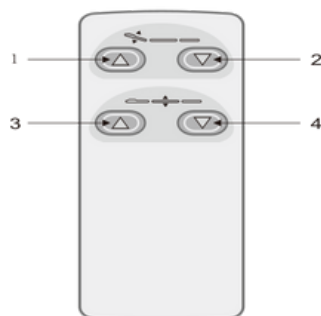

	Beskrivelse	Funksjon
1.	Ryggstøtten beveger seg opp	Ryggstøtten går jevnt opp ved å trykke på knappen.
2.	Ryggstøtten beveger seg ned	Ryggstøtten går jevnt ned ved å trykke på knappen.
3.	Hele sengen løftes opp	Sengen går jevnt opp ved å trykke på knappen.
4.	Hele sengen senkes ned	Sengen går jevnt ned ved å trykke på knappen.


Jonas behandlingsbenk

Art.nr: 1002251a

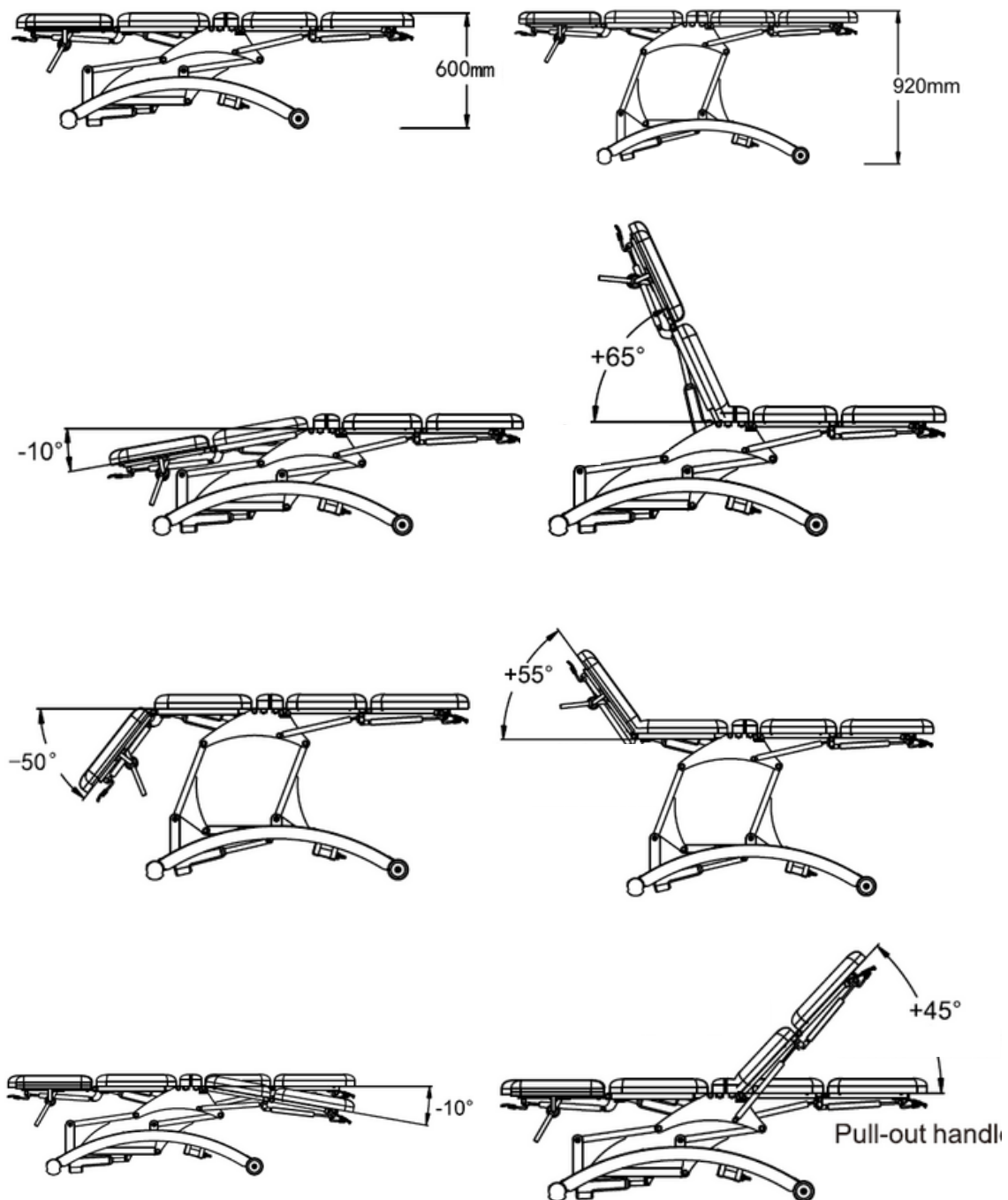

Generell informasjon

1. Maksbelastningen er 115 kg ved de hvite pilene.
2. Maksbelastningen er 30 kg for hodestøtten og fotstøtten. Sittende er ikke tillatt.

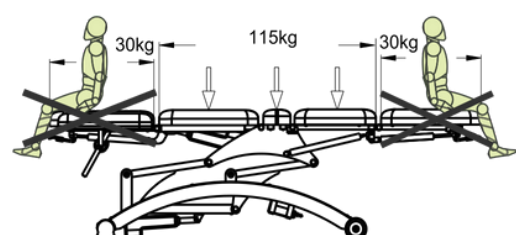


Jonas behandlingsbenk

Art.nr: 1002251a

Tekniske parametere

Støm	AC 100-120v or AC 220-240V or AC 100-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C-40°C
Relativ luftfuktighet	30%-90%
Løftekapasitet	175kg
Pakkestørrelse	186x72x65cm

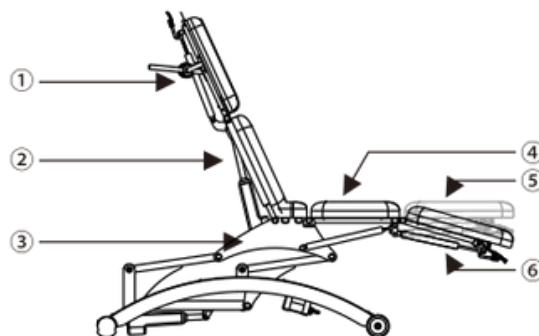

1. Vinkeljustering av hodestøtten (manuell justering)
2. Vinkeljustering av ryggstøtten
3. Hevejustering av hele sengen
4. Vinkeljustering av seteputen (manuell justering)
5. Vinkeljustering av fotstøtten (venstre) (manuell justering)
6. Vinkeljustering av fotstøtten (høyre) (manuell justering)

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).