


Odin pro behandlingsbenk

Art. nr: 1002246ebn

Elektrisk behandlingsbenk med 4 motorer som justerer høyde, tilt, rygg og fotende. Benken går ekstra lavt, 51cm, og kan roteres -120~+120°. Fotdel og nakkestøtte er justerbar i lengden. Armlener er avtakbare om ønskelig. Kommer med egen reset knapp, og "memory" system slik at benken husker valgte posisjoner.

I stolens rygg er det en sensor som stopper stolen hvis noe kommer i veien bak. Basen er utstyr med ledlys.

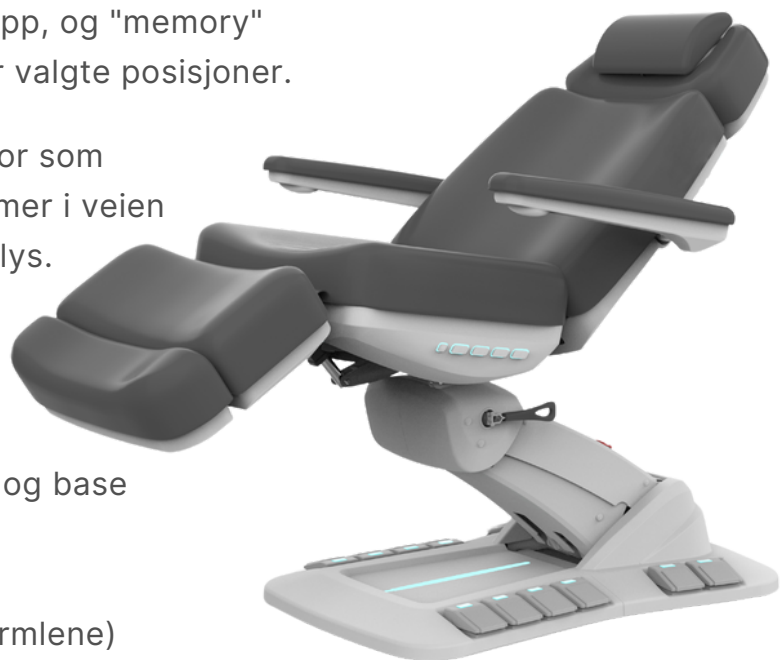

Motorer: 4

Styres: Knapper i sete, rygg og base

Lengde: 181 cm

Høyde: 51-86cm(+20° tilt)

Bredde: 64cm (82 cm med armlene)

Rotasjon: -120~+120°

Maksvekt: 200 kg

Materiale: PU

N.W: 108kg

G.W: 121kg


Emballasje: 140x81x58cm

Tillegg:

Håndkontroll

Fotkontroll


Benkepapirholder

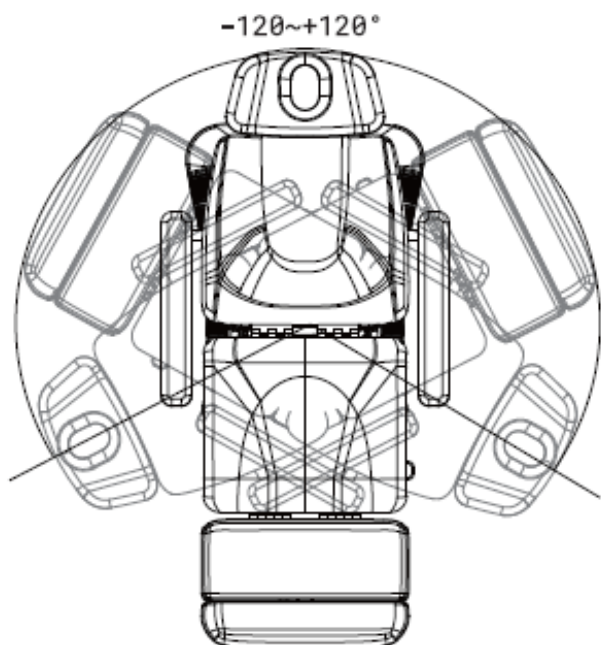

Odin pro behandlingsbenk

Art. nr: 1002246ebn


Standard konfigurasjon (vippebryter)

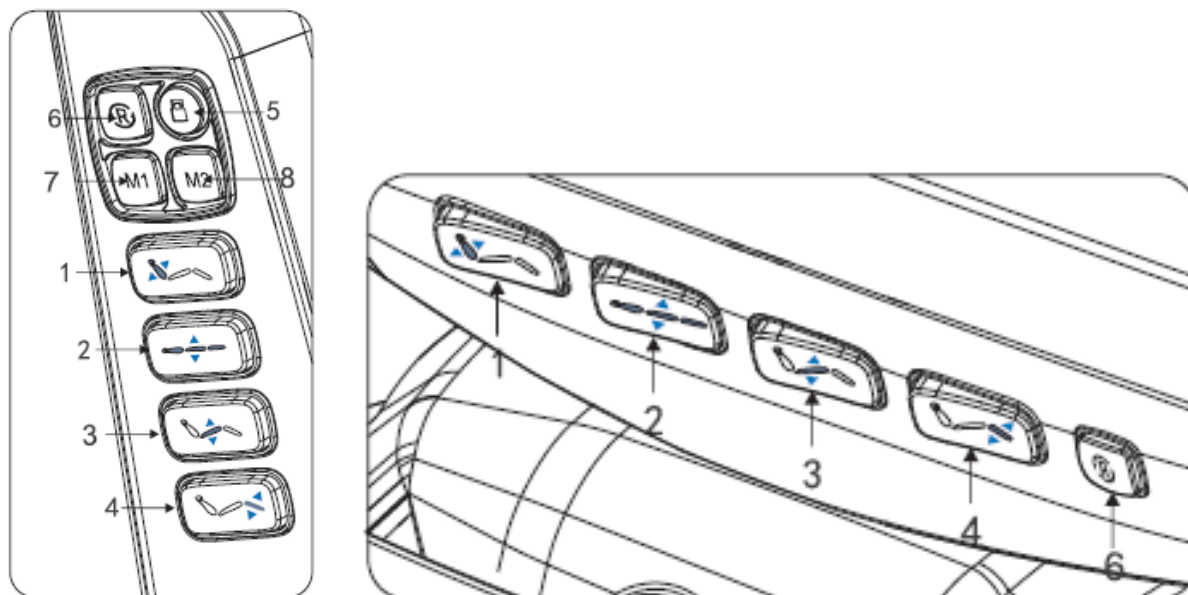

	Beskrivelse	Funksjon
1.	Justering ryggstøtte	Trykk på knapp høyre(venstre), ryggstøtte går opp(ned), vinkel øker(minker) i en jevn fart.
2.	Justering høyde	Trykk på knapp høyre(venstre), setegår opp(ned), høyde øker(minker) i en jevn fart.
3.	Justering sete	Trykk på knapp høyre(venstre), setet helles bakover. Høyde øker(minker) i en jevn fart.
4.	Justering fotstøtte	Trykk på knapp høyre(venstre), fotstøttegår opp(ned), vinkel øker(minker) i en jevn fart.
5.	Sikkerhetslås	Trykk på "sikkerhetslåsen" i tre sekunder- Et rødt lys rundt knappen vil skues på og ingen knapper kan brukes utenom sikkerhetslåsen. Trykk på "sikkerhetslåsen" i tre sekunder for å skru på alle funksjoner igjen.
6.	Reset knapp	Trykk på knappen for å få stolen tilbake i grunnposisjon.
7.	Memory posisjon 1	Velg ønsket posisjon - Trykk "M1" i 2-3 sekunder. Når du hører "pip, pip, pip" er stolens posisjon lagret.
8.	Memory posisjon 2	Velg ønsket posisjon - Trykk "M2" i 2-3 sekunder. Når du hører "pip, pip, pip" er stolens posisjon lagret.


Odin pro behandlingsbenk

Art. nr: 1002246ebn

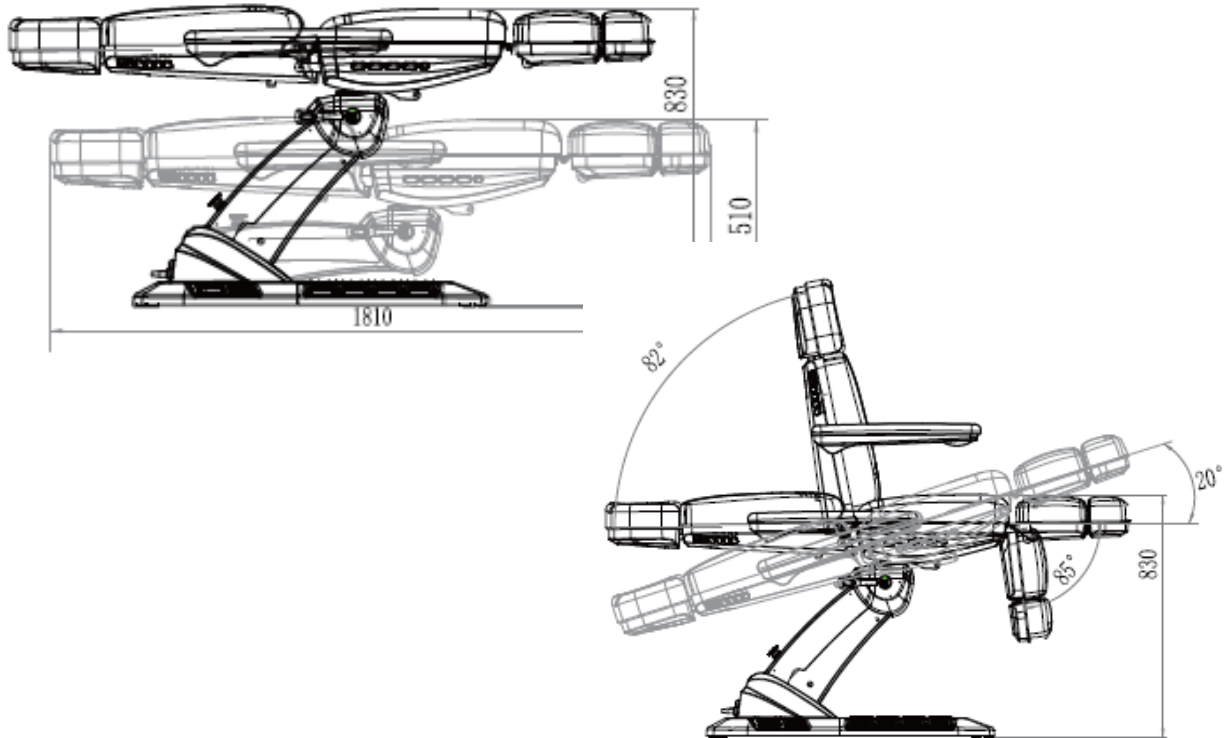

Driftssikkerhet

Press fotforlenger helt inn før sengen går til sitt laveste punkt.

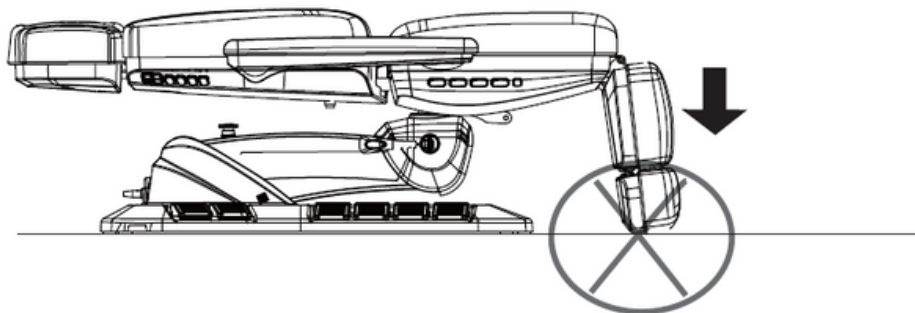

NO SITTING




Vennligst ikke sitt på ryggstøtten / fotstøtte eller hopp på ryggstøtten / fotstøtten, og unngå risikoen for å falle på grunn av overdreven vekt på ryggstøtten / fotstøtten.

Odin pro behandlingsbenk

Art. nr: 1002246ebn

Tekniske parametere

Støm	AC 100-120v or AC 220-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C-40°C
Relativ luftfuktighet	30%-90%
Løftekapasitet	200kg
Pakkestørrelse	140x78x58cm

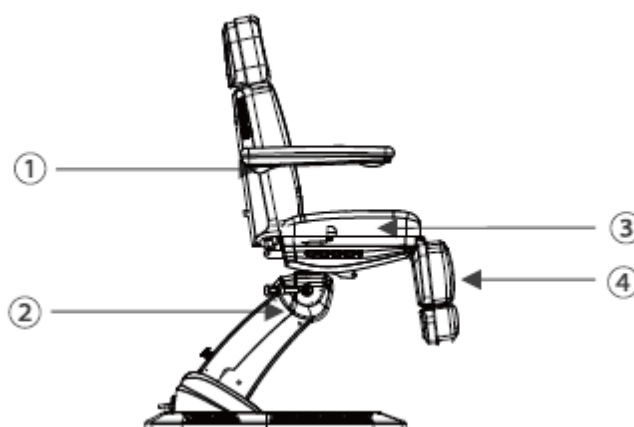

- 1.vinkeljustering av ryggstøtten
- 2.Løftejustering
- 3.Vinkeljustering av setet
- 4.Vinkeljustering av fotstøtte

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt.

Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales **ikke**.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).