

Odin

Art.nr: 1002246EB

Elektrisk behandlingsbenk med 4 motorer som justerer benkens høyde, tilt, rygg og fotdel. Benken kan roteres, samt at den har egen reset knapp som tilbakestillen benken til startposisjon.

Motorer: 4

Styres: Innebygde knapper

Roterbar: -120°~+120°

Tilt: 10°

Lengde: 186 cm

Høyde: 58 - 88 cm

Bredde: 56 cm - 86 cm

Maksvekt: 200kg

N.W: 103kg

G.W: 114 kg



Emballasje: 154x80x82cm

Tillegg:

Håndkontroll



Fotkontroll

Benkepapirholder

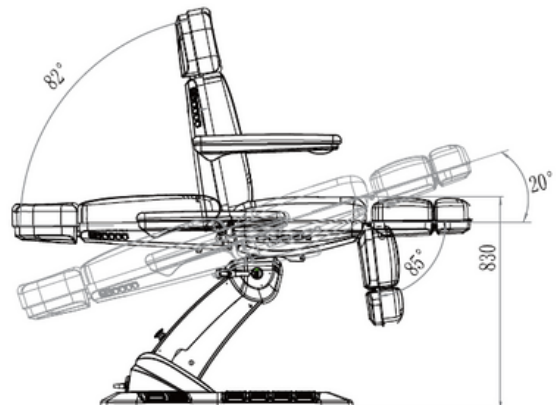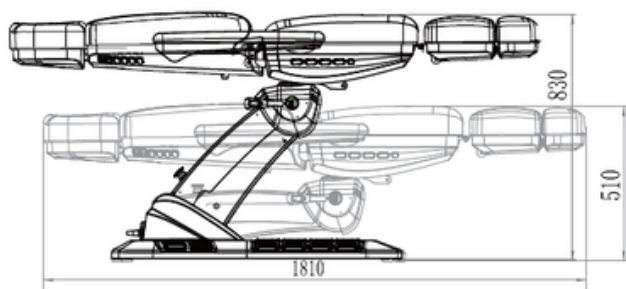


Odin

Art.nr: 1002246EB

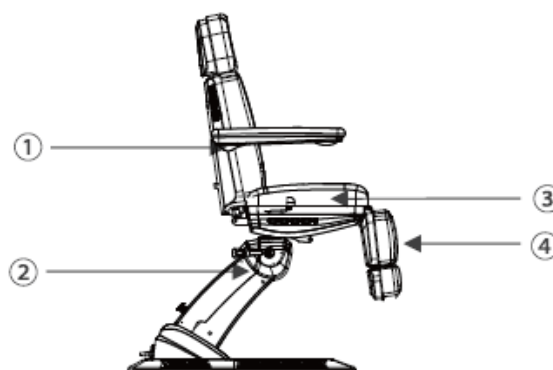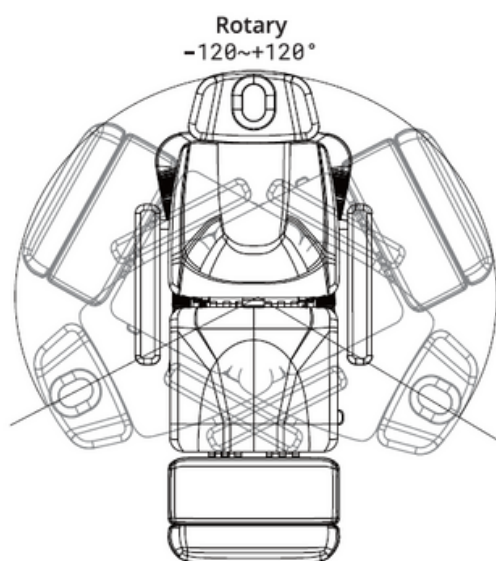

1. Vinkeljustering av ryggstøtten
2. Hevejustering av hele sengen
3. Vinkeljustering av setet
4. Vinkeljustering av fotstøtten

Standard konfigurasjon (vippebryter)

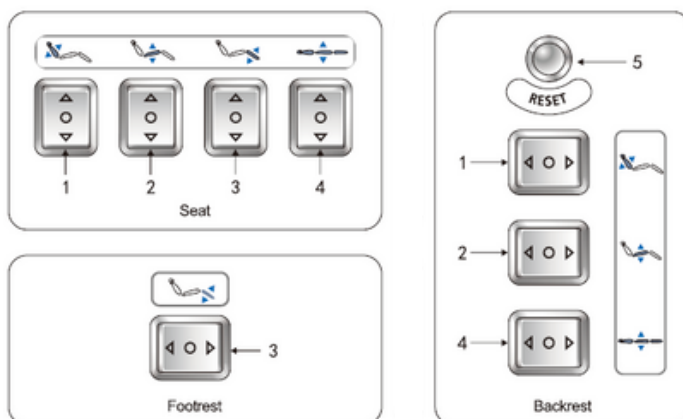


	Beskrivelse	Funksjon
1.	Justering av ryggstøtte	Trykk på knappen opp (ned), ryggstøtten beveger seg opp (ned), vinkelen øker (reduseres) med jevn hastighet.
2.	Justering av sete	Trykk på knappen opp (ned), setet lener seg bakover (beveger seg tilbake til horisontal posisjon).
3.	Justering av fotende	Trykk på knappen opp (ned), fotstøtten beveger seg opp (ned), vinkelen reduseres (øker) med jevn hastighet.
4.	Justering av høyde	Trykk på knappen opp (ned), fotstøtten beveger seg opp (ned), vinkelen reduseres (øker) med jevn hastighet.
5.	Reset-knapp	Trykk på knappen opp (ned), setet beveger seg opp (ned), høyden øker (reduseres) med jevn hastighet.

Odin

Art.nr: 1002246EB

Stramming av hodestøtte

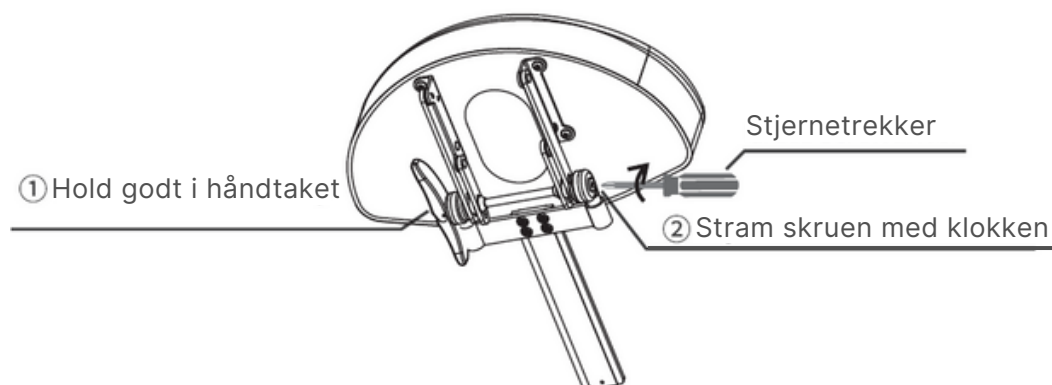

Tekniske parametere

Støm	AC 100-120v or AC 220-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C-40°C
Relativ luftfuktighet	30%-90%
Løftekapasitet	200kg
Pakkestørrelse	154x80x82cm

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt. Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).