

Petra behandlingsbenk

Art.nr: 1002240

Behandlingsbenk med tre motorer som styrer benkens høyde, rygg og tilt. Fotdelen justeres ved hjelp av en hydraulisk pumpe.

Behandlingsbenken har innebygd knappespanel i ryggstøtten og i setet, slik at man enkelt skal kunne styre stolen i ønsket posisjon.

Benken kan legges helt flatt, eller settes i en oppreist posisjon.

Motorer: 3

Styres: Innebygde knapper

Lengde: 190 cm

Høyde: 67-88 cm


Bredde: 56-80 cm (bredde med armlene)

Maksvekt: 200kg

N.W: 75kg

G.W: 85kg


Emballasje: 170x65x78cm

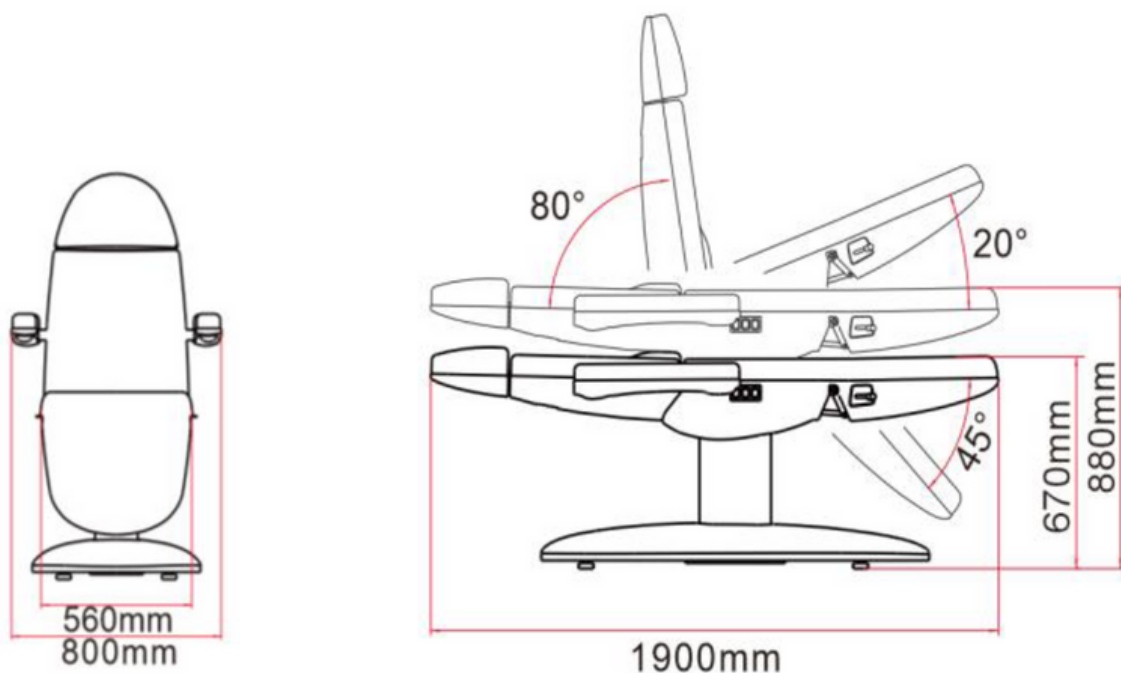

Petra behandlingsbenk

Art.nr: 1002240

Standard Konfigurasjon (vippebryter)

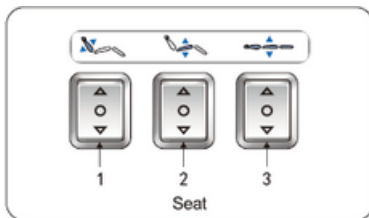

	Beskrivelse	Funksjon
1.	Knapp for justering av ryggstøtte	Trykk knappen opp (ned), ryggstøtten beveger seg opp (ned), vinkelen øker (reduseres) med jevn hastighet.
2.	Knapp for setejustering	Trykk knappen opp (ned), setet vipper bakover (beveger seg tilbake til horisontal posisjon).
3.	Knapp for høydejustering	Trykk knappen opp (ned), setet beveger seg opp (ned), høyden øker (reduseres) med jevn hastighet.

Tekniske parametere

Støm	AC 100-120v or AC 220-240V, 50/60Hz
Maksimal effekt	300W
Omgivelsestemperatur	0°C-40°C
Relativ luftfuktighet	30%-90%
Løftekapasitet	175kg
Pakkestørrelse	143x82x70cm

Vedlikehold:

Etter bruk, rengjør stolen med et nøytralt rengjøringsprodukt.

Desinfeksjon som inneholder alkohol, syre, eller er alkalisk anbefales ikke.

Smør bevegende deler jevnlig (en gang i året).