

Krystallsliping

Art.nr: 100f-336a

Behandlingen gir en grovere mekanisk peeling, forbedrer hudkvaliteten, reduserer pigmenteringer, behandler arr, jevner ut finere linjer i huden og resulterer i en mykere, friskere hud, med mer glød.

Størrelse: 49,5x45x22,5

Netto vekt: 7,3 kg

Arbeidsspenning: 100-120V / 220-240V

Arbeidsfrekvens: 50HZ/60HZ

Arbeidskraft: 65W (Maksimum)




Betjeningsinstruksjon:

1. Installer maskinen, og forsikre deg om at hovedenheten og tilbehøret er godt koblet sammen.
2. Slå på strømmen. LCD-skjermen lyser opp og viser "Mikrokrystall" etter at summeren gir fra seg en "pip"-lyd. Etter dette går maskinen over til standby-modus.
3. Når maskinen er i standby-modus, viser LCD-skjermen at strømmen er på NO1 og standardtiden er 15 minutter.
4. Trykk på '+' / '-' knappene på timeren for å legge til eller trekke fra tid innenfor et område på 1-60 minutter. Du kan forlenge eller redusere behandlingstiden etter behov.
5. Trykk på '+' / '-' knappen for 'ENERGY', du kan justere kraften til luftpumpen fra nivå 1 til gir 10.
6. Trykk på knappen for 'START/PAUSE' for å starte arbeidet, mens LCD-skjermen viser arbeidsstatus. Trykk på knappen igjen for å stoppe arbeidet, mens LCD-skjermen viser stoppstatus.
7. Når forhåndsinnstilt tidtaker har gått ut, vil du høre en "pip"-lyd fra summeren. Tidtakeren vil tilbakestilles til 15 minutter, men kraftinnstillingen og spray- vakuummodusen vil ikke endres. Hvis du slår av strømmen og starter den på nytt, vil maskinen gå tilbake til oppstartmodus.

Krystallsliping

Art.nr: 100f-336a

Brukerpanel

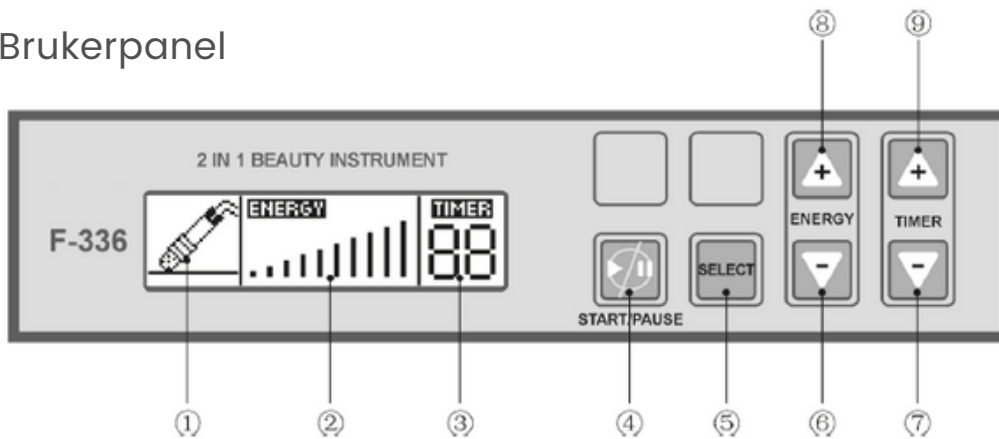

1. Skjerm for mikrokrySTALLens arbeidsstatus
2. Skjerm for ENERGY
3. Skjerm for TIMER
4. Knapp for "Start/Pause"
5. Knapper for å øke eller redusere energi
6. Knapper for å forlenge eller forkorte behandlingstiden

Krystallsliping

Art.nr: 100f-336a

Behandlingsveiledning:

Dette er en overflatebehandling i form av en grov mekanisk peeling, for å få frem ny og frisk hud ved bruk av mikrokrystaller. Behandlingen anbefales som en kur for å få maksimalt resultat. Enten kunden har uren hud, acnearr, rynker, pigmentskader eller bare en hud som trenger en revitalisering.

1. Start med å rense kundens hud med passende MCCM Cleansing milk. Rens to ganger. Avslutt med MCCM tonic, og klapp huden helt tørr med en kleenex.
2. Deretter skruer du på maskinen. Start gjerne med lav styrke, og tilpass deretter. Husk å alltid se an kundens behov.
3. Legg merke til hullet nederst på hånd stykket, dette dekkes med behandlers pekefinger for å skape vakuemet.
4. Start i pannen og gå fra midten av pannen, følg hårfestet nedover.
5. Husk å fikser huden underveis, og gå nedover.
6. Deretter fra nese, over kinn og til hårfeste.
7. Fra nese og nedover til leppe.
8. Fra underleppen og ned til hake.
9. Fra hake, langs med kjevebenet og ut til hårfeste.
10. Fra midten av hals og ut.
11. Du kan jobbe alle veier, men jobb gjerne mot lymfe den første runden og jobb med halve ansiktet av gangen. Etter dette kan du gå tilbake å jobbe med problemområder.
12. Sett av 20 minutter til hudslip, men se an hva kundens hud har behov for.
13. Skru av maskinen og plasser håndstykket korrekt tilbake på maskinen.
14. Er det ønskelig med massasje eller utklemming kan dette tilføyes her- vær varsom, og se an huden/Evt. hudreaksjoner.
15. Påfør MCCM Collagen mask (eller annen maske etter hudtype, denne kan ligge på i 15 minutter. Fjern sheetmasken og masser inn rester fra masken)
16. Avslutt med tonic ved behov. Deretter velger du øyekrem, serum og krem etter kundens behov.